

# Радиолифтинг щипковый

**Blue RF – фотонно-вакуумное радиоволновое лечение лица и тела.**

Щипковый Blue RF способствует укреплению и подтяжки кожи, формированию нового коллагена и прекрасно улучшает лимфодренаж;



## Показания к применению:

- Наличие морщин
- Наличие «мешков» под глазами
- Локальные жировые отложения
- Сосудистые повреждения, краснота
- «Уставшее», отекающее лицо
- Целлюлит (эффект апельсиновой корки)

## Принцип работы:

Манипула мягко засасывает кожную складку между двумя биполярными RF электродами и направляется фотонное излучение. Это обеспечивает сильнейшее воздействие на соответствующий слой кожи и подкожно жировой клетчатки. Благодаря этому энергия RF воздействует только на кожную складку при этом достигается отличный лечебный эффект даже в области век. А так же обеспечивается безопасность лечения. Синий лазер уменьшает сопротивляемость кожи благодаря нагреву, а энергия RF глубоко проникает в соединительную ткань.

Синергетическое сочетание синего лазера и RF прогрева увеличивает энергетический обмен в тканях и насыщение клеток кислородом благодаря прогреву. В аппарате Blue RF под влиянием высокой температуры происходит немедленное сокращение волокнистых тканей, в частности, коллагеновых волокон, а затем начинается синтез коллагена и образование новых коллагеновых структур, что обеспечивает достижение желаемого эффекта. Фотонное излучение голубого цвета с длиной волны - 440-485 нм оказывает на кожу антистрессовое воздействие, расслабляет периферическое микроциркуляторное русло, оптимизирует работу периферической нервной системы.

## Результаты от процедуры по лицу:

- **лифтинг в области глаз, век.**
- **лифтинг лица, шеи, зоны декольте.**
- **снятие отечности**
- **уменьшение отечности нижнего века «мешков под глазами»**
- **уменьшение сосудистых проявлений на лице**

- улучшение цвета и тона кожи
- реабилитация после пластических операций и инвазивных процедур (гиперкоррекция при контурной пластики, нитевой лифтинг)
- процедура выходного дня
- длительный пролонгированный эффект
- безопасно, безболезненно, эффективно.

Для проведения процедуры в области глаз и век используется насадка № 1



Для проведения процедуры по лицу используется насадка №2






### **Результаты от процедуры по телу:**

- лифтинг тела
- идеальная процедура для коррекции внутренней поверхности рук, бедер, передней брюшной стенки
- снятие отечности и одновременная подтяжка тела
- реабилитация после инвазивных процедур (пластическая хирургия, мезотерапия, нитевой лифтинг)
- безболезненно и эффективно

Аппарат создан на симбиозе биполярного RF лифтинга, голубого фотонного излучения, а так же вакуумной аспирации, что позволило добиться глубокого проникновения через кожу с ограниченным влиянием на эпидермис. Процедура безболезненна, и наоборот даже приятна, Вы ощущаете лишь чувство тепла.

Для проведения процедуры по телу используется насадка № 3



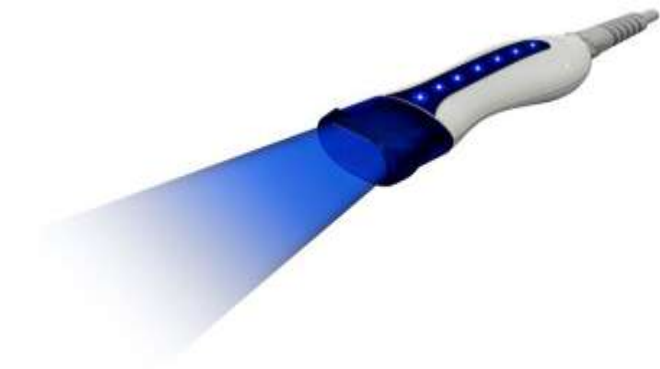

### Рекомендованное количество и периодичность процедур

Процедура	Количество процедур	Интервал между процедурами
подтяжка лица	8-10	1 неделя
разглаживание морщин	8-10	1 неделя
борьба с целлюлитом (объемные области требуют больше сеансов)	6	1 неделя
омоложение кожи	6	1 неделя
коррекция фигуры и контуров тела	8-10	1 неделя

***объёмные области требуют больше сеансов !!!***